

排卵日が
約1日前に
わかる

排卵日予測検査薬

第1類医薬品 一般用検査薬

ハイテスター[®]H



本製品を避妊の目的で使用しないこと。

特徴

- 排卵日を約1日前に予測できます。
- 尿をかけるだけの簡単操作です。
- 独自技術による「トリプルライン検出法」です。
- 日本製です。
- 色の濃淡ではなくラインの本数で判定します(薄くてもラインを確認できれば本数として判定できます)。

使用目的

尿中の黄体形成ホルモン(LH)の検出(排卵日予測の補助)

成分・分量

1テストスティック中
 ハプテン結合マウスモノクローナル抗LH抗体 23.2ng
 マウスモノクローナル抗LH抗体結合金コロイド 1.15μg

保管方法・有効期間

室温保存
36ヵ月

検出感度

30mIU/mL

ご使用方法

検査のタイミング

次回生理(月経)開始予定日の
17日前から検査を開始します

- ① 次回生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始してください。
- ② 検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。
(過去に検査をしてLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性が陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。)

検査時期に関する注意

- 1日1回検査をする場合：毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。
 - 1日2回検査をする場合：例えば朝夕など毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。
- ※生理(月経)周期が不規則な場合は、最近の2~3周期のうち、一番短かった生理(月経)周期をもとに、検査を開始してください。


〈例〉

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
17日前	16日前	15日前	14日前	13日前	12日前	11日前
15	16	17	18	19	20	21
10日前	9日前	8日前	7日前	6日前	5日前	4日前
22	23	24	25	26	27	28
3日前	2日前	1日前				
29	30					

次回生理(月経)開始予定日

検査の手順

テストスティック各部名称

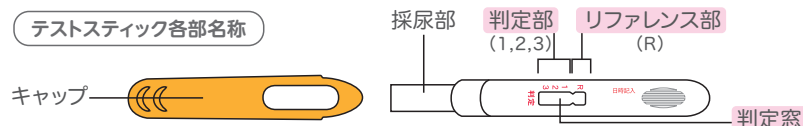

1 採尿

キャップを反対側にはめて、
採尿部に尿を5秒以上かける。




5秒
尿をかける

※紙コップ等を使用する場合は、紙コップ等に尿を採り、
採尿部全体がつかないように10秒間尿につける。

2 10分待つ

キャップをかぶせ、平らな場所
に置き、リファレンス部に
赤紫色のラインが出たこと
を確認。

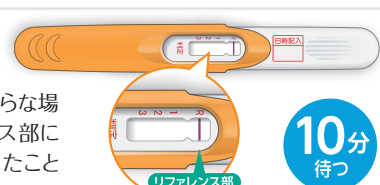

10分
待つ

この検査薬は、薬剤師から説明を受けて、「使用上の注意」をよく読んで、正しくお使いいただきますよう、ご説明ください。
「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

判定のしかた

〈ラインの本数で判定します。薄くてもラインを確認できれば、本数として判定できます。〉

尿をかけた、または尿につけた検査薬を10分経過したのち、速やかに判定してください。初めて陽性になったときがLHサージが検出されたということであり、間もなく排卵がおこるといえるしです。正常に操作が行われた場合、リファレンス部に赤紫色のラインが出ます。判定部のラインの本数(0~3本)により、それぞれ、スコア0、スコア1、スコア2、スコア3と判定してください。

	判定窓 リファレンス部 判定部						
未使用		判定部 ラインの本数	0本	1本	2本		3本
		スコア判定	スコア0	スコア1	スコア2	スコア3	再検査

*リファレンス部にラインが出ていない場合は尿量不足等の操作上のミスが考えられます。再度、検査の手順や注意事項をよく読んで新しい検査薬で検査を行ってください。

10mIU/mLのとき スコア1、30mIU/mLのとき スコア2、100mIU/mLのとき スコア3
*10、30、100mIU/mLになるように調整した管理検体を測定した結果。

陽性 前日と比べてスコアが増加した場合。ただし、前日スコア0、当日スコア1の場合は陰性と判定してください。

(判定例)

スコア判定	前日	当日	前日	当日	前日	当日	前日	当日	前日	当日
スコア判定	スコア0	スコア2	スコア0	スコア3	スコア1	スコア2	スコア1	スコア3	スコア2	スコア3

LHサージが検出されました。間もなく排卵がおこると予測されます。初めて陽性になった日からその翌日が最も妊娠しやすい時期(排卵日)です。

陰性 前日と比べてスコアが増加しなかった場合、または前日スコア0、当日スコア1の場合。

(判定例)

スコア判定	前日	当日	前日	当日	前日	当日	前日	当日	前日	当日
スコア判定	スコア0	スコア0	スコア0	スコア1	スコア1	スコア1	スコア1	スコア2	スコア2	スコア3

LHサージが検出されませんでした。翌日以降もほぼ同じ時間帯に陽性になるまで検査を続けてください。

判定に関する注意

①検査初日からスコア2または3になった場合

既に排卵された可能性があります。妊娠を望む場合は、できるだけ早く性交することで、妊娠の可能性が高まります。また、スコアの低下が確認できるまで検査を続けてください。
(確認できない場合は、③を見てください。)

③検査期間中、スコア2または3が続く場合

早期に医師の診療を受けてください。
妊娠、分娩後、流産後、胎状奇胎・絨毛癌等の絨毛性疾患、人工妊娠中絶後、あるいは不妊治療のための薬剤投与、内分泌障害、閉経期などでは、排卵と無関係に陽性が続く場合があります。

②検査期間中、陰性が続く場合

早期に医師又は薬剤師に相談してください。
通常、排卵期に、本品を使用すると陽性となりますが、女性の内分泌的背景、例えば不規則な生理(月経)周期、短期LHサージ(12時間以内)などの原因で、まれに陽性とならないことがあります。

④検査をし、その都度陽性を確認した上で適切な時期に性交しても6周期以上妊娠しない場合

妊娠しにくい原因は排卵に関する問題だけではありません。できればパートナーと一緒に医師に相談してください。ただし30歳代後半以上の方、結婚後妊娠できない期間が長い方、早期の妊娠をご希望の方は早めに受診することをお勧めします。

販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ハイテスターH	
包装	5回用	10回用
メーカー希望小売価格	2,838円(税抜価格2,580円)	4,818円(税抜価格4,380円)
バーコード		