

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第2類医薬品

一般用検査薬

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ハイテスターN
2	成分・分量	1 テストスティック中 ・マウスモノクローナル抗 hCG 抗体 1.0 μg ・マウスモノクローナル抗 hCG 抗体結合金コロイド 6.0 μg
3	使用方法	<p>〈検査のしかた〉 生理予定日の約1週間後から検査できます。朝・昼・夜いつの尿でも検査できます。</p> <p>① 準備: 個包装を検査直前に開封し、テストスティックを取り出す。キャップをテストスティックの反対側にはめる。</p> <p>② 尿をかける: 採尿部を下に向け、正面から採尿部全体に尿を5秒以上かける。(紙コップ等を使用する場合は、紙コップに尿を採り採尿部全体がつかないように10秒間尿につける。)</p> <p>③ 静置: 採尿部を下に向けたまま、キャップをかぶせ、平らな場所に置き1~3分待つ。</p> <p>〈判定のしかた〉 最初に終了窓に赤紫色の終了ラインが出ていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・陽性: 妊娠反応あり(判定窓に赤紫色のラインが出た場合)</li> <li>・陰性: 妊娠反応なし(判定窓に赤紫色のラインが出ない場合)</li> </ul> <p>検査のしかたの詳細については商品に同梱されている添付文書に記載してありますので、必ずよく読んでからお使いください。</p>
4	使用目的	尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)の検出(妊娠の検査)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>〈してはいけないこと〉 ・検査結果から、自分で妊娠の確定診断をしないでください。</p> <p>〈相談すること〉 ・不妊治療を受けている人は使用前に医師に相談してください。 ・判定が陰性であっても、その後生理が始まらない場合、再検査するか医師に相談してください。</p> <p>【この検査薬は妊娠しているかどうかを補助的に検査するものであり、妊娠の確定診断を行なうものではありません。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2017.12】