

99%以上の
正確さ

妊娠検査薬

第2類医薬品

一般用検査薬

ハイテスター[®]N



特徴

- 99%以上の正確さです。
- 判定結果が一目でわかります。
- 尿をかけるだけの簡単操作です。
- 日本製です。
- 1分から判定可能です。

使用目的

尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)の検出〔妊娠の検査〕

成分・分量

1テストスティック中
マウスモノクローナル抗hCG抗体 1.0μg
マウスモノクローナル抗hCG抗体結合金コロイド 6.0μg

保管方法・有効期間

室温保存
36ヵ月

検出感度

50 IU/L

ご使用方法


●検査のしかた

準備 尿をかける 静置 の簡単3ステップ

尿をかけるだけの簡単操作です。生理予定日の約1週間後から検査できます。朝・昼・夜いつの尿でも検査できます。

①準備

個包装を**検査直前**に開封し、テストスティックを取り出す。キャップをテストスティックの反対側にはめる。

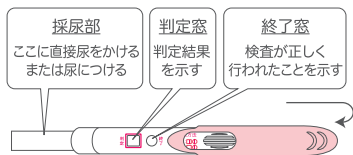


②尿をかける

採尿部を下に向け、正面から採尿部全体に尿を**5秒以上**かける。



③静置

採尿部を下に向けたまま、キャップをかぶせ、平らな場所に置き**1~3分**待つ。

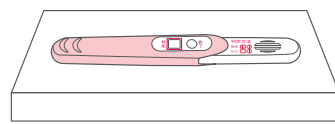

●判定のしかた

一目でわかる判定結果

最初に終了窓に赤紫色の終了ラインが出ていることを確認してください。判定窓に赤紫色の縦ラインが出たら陽性です。判定方法がテストスティックにも記載されているので便利です。



妊娠している可能性があります。できるだけ早く医師の診断を受けてください。




今回の検査では妊娠反応は認められませんでした。その後も生理が始まらない場合は、おおよそ1週間後に再検査するか医師にご相談ください。

この検査薬は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いいただき、確定診断は必ず医師にご相談いただきますよう、ご説明ください。「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

使いやすい
テスト
スティック

初めて
でも
簡単

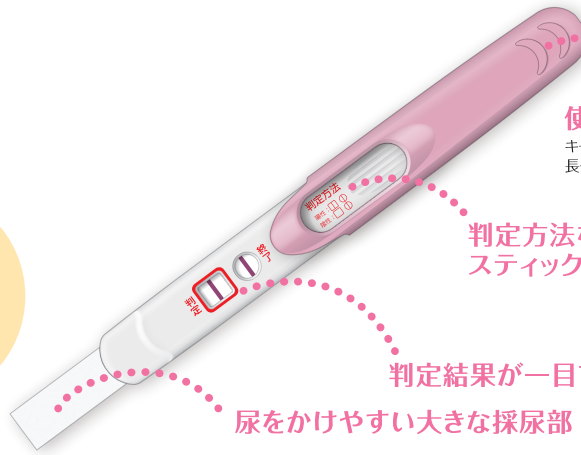


使いやすいロングタイプ
キャップを反対側につけるとテストスティックが長くなり安心してご使用いただけます。

判定方法をテストスティックに記載


判定結果が一目でわかる

尿をかけやすい大きな採尿部

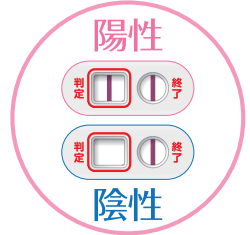

妊娠の成立

- ① 約1ヵ月に1回、卵巣から卵管へ、卵子が放出される ▶「排卵」
- ② 卵管で卵子と精子が出会い、受精卵ができる ▶「受精」
- ③ 受精卵は細胞分裂を繰り返しながら移動し、子宮内膜へもぐりこむ ※着床することで妊娠が成立 ▶「着床」

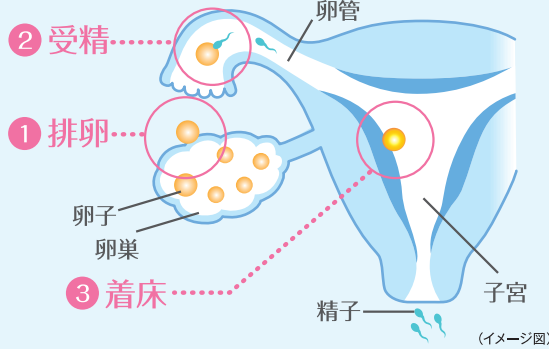


精子の寿命:2~3日間
卵子の寿命:約24時間

妊娠の早期検査の重要性

妊娠している場合は、次の生理予定日の頃には、ほぼ妊娠4週目にあたり、既に胎児の脳や心臓などが形成され始めています。この頃から妊娠16週目頃までは胎児の発育にとって重要な時期であり、外からの影響を受けやすい時期でもあります。胎児の健全な発育と母体の健康にとっては、妊娠しているかどうかをできるだけ早く知り、栄養摂取や薬の使用に十分気をつけるとともに、飲酒・喫煙をさげ、風疹などの感染症や放射線照射などに注意することが大切です。

妊娠と検査時期

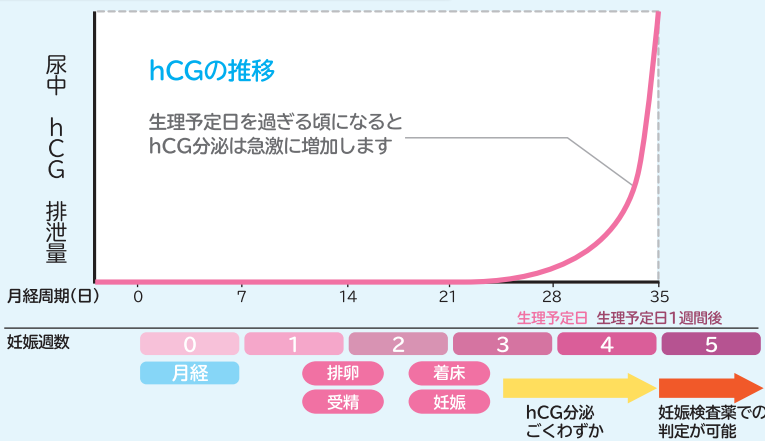

ハイテスターNIは妊娠したときに分泌されるhCG（ヒト絨毛性腺刺激ホルモン）というホルモンが尿中に含まれているかどうかを検出する検査薬です。このhCGは妊娠（受精卵の着床）後、徐々に分泌され、生理予定日を過ぎた頃に急激に増加します。生理予定日やその前に検査すると、hCGがごくわずかなので妊娠していても陰性になる可能性があります。生理予定日の約1週間後から検査できます。

※これは月経周期28日型の場合です。月経周期には個人差があり、すべての人にあてはまるわけではありません。

販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	ハイテスターN	
包装	1回用	2回用
メーカー希望小売価格	880円(税抜価格800円)	1,320円(税抜価格1,200円)
バーコード		